


Contenuto del kit per un test di screening per la preeclampsia Lumella:

- A.** Un (1) sacchetto di alluminio contenente un test Cartuccia e un essiccante
- B.** Una (1) fiala con tappo contenente tampone per campione
- C.** Due (2) micropipette per la raccolta del sangue
- D.** Due (2) pipette di trasferimento
- E.** Una (1) lancetta pungidito
- F.** Un (1) tampone imbevuto di alcol
- G.** Una (1) benda

A

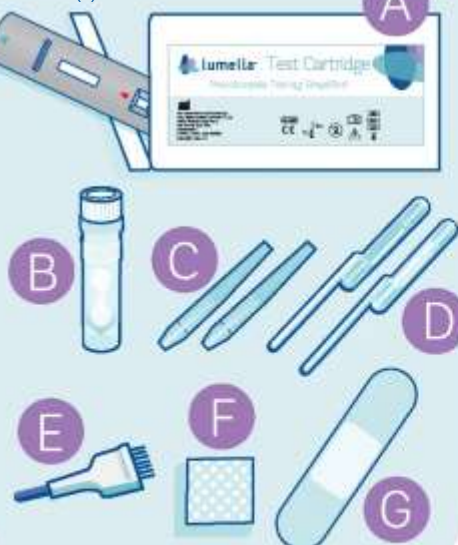

1

Pulire il dito con il tampone imbevuto di alcol. Lasciare asciugare il dito all'aria.




2

Aprire la fiala con il tampone e posizionarla nel portaprovette.



3

Svitare e rimuovere la parte inferiore della lancetta pungidito.

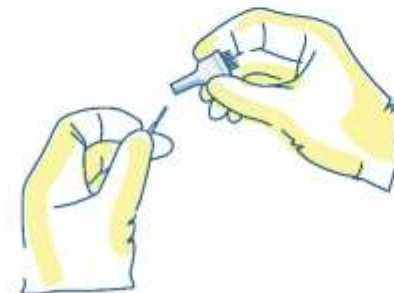

4

Dopo aver punto il polpastrello, avvicinare delicatamente la micropipetta al sangue **senza schiacciare il bulbo**.



5


Inserire la punta della micropipetta per la raccolta del sangue nel tampone. Trasferirvi il sangue schiacciando delicatamente il bulbo. Sciacquare 2 volte.



QUANTITÀ
riavvicinare la micropipetta al sangue per completare la



QUANTITÀ

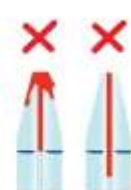

QUANTITÀ
gettare la micropipetta e utilizzare l'altra inclusa nel kit per

NON PULIRE LA PUNTA

6

Tappare la fiala e capovolgerla delicatamente per 8 volte. **NON AGITARE.** Rimuovere il tappo e posizionare la fiala nel portaprovette.



7

Accendere il lettore e scansionare l'etichetta RFID come mostrato di seguito. Posizionare l'etichetta metallica sopra il logo nella parte superiore del lettore.




8

Inserire completamente la cartuccia nell'apposito alloggiamento, introducendo il lato contrassegnato dalla freccia.



9

Schiacciare completamente il bulbo della pipetta di trasferimento e quindi immergere fino in fondo la punta nella fiala con il tampone. Rilasciare il bulbo in modo da riempire la pipetta. L'eventuale eccesso di campione ricadrà nel serbatoio. Assicurarsi che nella pipetta non siano presenti bolle.

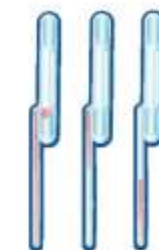

QUANTITÀ ERRATA O INADEGUATA



QUANTITÀ ACCETTABILE

Serbatoio

10

Posizionare la punta della pipetta di trasferimento sul quadrato bianco nella porta per campione e schiacciare il bulbo per trasferire il campione nella cartuccia.



11

Accendere la stampante Bluetooth. Attendere **10 minuti** per l'elaborazione dei risultati del test, che verranno stampati automaticamente. Annotare i risultati in modo appropriato.

